



Wall Fastening M2 w/o power

Manuel d'utilisation

P/N: 1042100100



CE

Date de publication: 13.05.2025

rév. A.fr

Table des matières

Introduction Consignes de sécurité	4
Domaine d'application	4
Contenu de la livraison	5
Caractéristique techniques	5
Accessoires	5
Montage Installation	6
Fonctionnement	7
Nettoyage Désinfection	8
Symboles utilisés	8
Mise au rebut	9
Service Fabricant	9

Introduction | Consignes de sécurité

Introduction

Cher client, chère cliente,
Merci pour l'achat de la fixation murale M2 sans alimentation.

Dans les présentes instructions, vous trouverez des informations techniques, des consignes d'utilisation ainsi que des consignes de montage.

Consignes de sécurité

- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant de mettre la fixation murale M2 sans alimentation en service.
- Conservez soigneusement ce manuel pour une consultation ultérieure et respectez avant tout les consignes de sécurité.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages liés à un fonctionnement, une utilisation, un nettoyage, une modification ou une installation non conformes.
- L'entretien et la maintenance sur la fixation murale M2 sans alimentation doivent uniquement être réalisés par du personnel spécialisé dûment autorisé. Veuillez vous adresser directement au service client technique de CRS medical GmbH en cas de défaut. Toute modification apportée au dispositif ou à ses accessoires et non réalisée par le fabricant entraînent une annulation de la validité des obligations au titre de la garantie et de la responsabilité de CRS medical GmbH.
- Si le véhicule terrestre EMS est impliqué dans un accident (pas de dommages mineurs), le support doit être remplacé. Toute poursuite de l'utilisation entraîne une annulation de la validité des obligations au titre de la garantie et de la responsabilité de CRS medical GmbH.
- Vérifiez la fixation murale M2 sans alimentation et ne l'utilisez pas en cas de dommages mécaniques visibles sur le mécanisme de fermeture.

Domaine d'application

La fixation murale M2 sans alimentation est destinée uniquement à la fixation sécurisée d'un ZOLL M2® en association avec le sac d'accessoires d'origine ZOLL M2®. L'utilisation d'une autre sacoche de protection pour cet appareil n'est pas autorisée.

La fixation murale M2 sans alimentation est conçue pour un usage stationnaire ou pour une utilisation dans une ambulance. Dans une ambulance, le défibrillateur utilisé est fixé de façon sécurisée et l'utilisation du défibrillateur est ainsi possible pendant l'intervention. Le support doit uniquement être utilisé dans des environnements protégés. Cela implique des murs massifs à l'intérieur de bâtiments et des parois stables dans des véhicules terrestres EMS.

Veillez également respecter le manuel d'utilisation du défibrillateur.

Contenu de la livraison

1 fixation murale M2 sans alimentation (P/N : 1042100100) (UDI-DI : 04251964600195)

1 manuel d'utilisation

Caractéristique techniques

Description	Données
Poids	3950 g
Dimensions (hxlxp)	362x277x231 mm
Température de fonctionnement	0°C à +40°C, 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation
Température de stockage	-30°C à +70°C, 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation

Dans le cadre de l'amélioration du produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles à l'article.

Accessoires

Aucun autre accessoire n'est disponible.

Fonctionnement

Ouverture

Déverrouillez la fixation murale M2 sans alimentation en tirant la poignée à étrier rouge vers l'avant (1) puis en la déplaçant vers le haut (2). Le verrouillage s'enclenche dans la position supérieure (3) et l'appareil peut être retiré.



Fermeture

Veillez à ce que le ZOLL M2™ avec la sacoche d'accessoires correspondante tiennent bien en place dans la coque inférieure de la fixation murale M2 sans alimentation.

Pour la fermeture, aucun déverrouillage n'est nécessaire. Saisissez la poignée à étrier rouge et enfoncez le couvercle vers le bas. La fixation murale M2 sans alimentation est verrouillée de la manière la plus sûre possible en relâchant le couvercle après avoir dépassé la résistance et en le laissant glisser lui-même en position finale. Un claquement est alors audible.

Nettoyage | Désinfection

Veillez sortir le ZOLL M2™ du support pour le nettoyer.

La fixation murale M2 sans alimentation peut être nettoyée avec un chiffon non pelucheux humide et des produits nettoyants doux pour plastiques disponibles dans le commerce. Avant toute utilisation, veuillez vérifier que le produit nettoyant ne contient pas de solvant.

Utilisez également des produits désinfectants disponibles dans le commerce pour la désinfection.

Symboles utilisés



Voir Respecter le manuel d'utilisation/les consignes de sécurité



Marquage CE conformément à la directive relative aux produits médicaux 2017/745 (Medical Device Regulation)



Numéro de référence



Respecter le manuel d'utilisation électronique



Numéro de lot d'identification unique du produit



Numéro de lot



Fabricant



Médical produit



La plage de température recommandée pour la conservation



L'humidité de l'air relative recommandée pour la conservation



Manipuler le colis avec précaution

Mise au rebut

Les emballages sont des matières premières et sont donc recyclables. Veuillez donc les jeter en les triant de manière respectueuse de l'environnement.

Vous obtiendrez plus d'informations sur une mise au rebut écologique auprès du fabricant.

Service | Fabricant

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com



Loherstraße 6
D-35614 Aßlar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29

info@crs-medical.com
www.crs-medical.com